

APESIN swift



Désinfectant à base d'alcool

- Prêt à l'emploi ■ Désinfectant à large spectre
- PT1, PT2, PT4 (Belgique & Grand Duché de Luxembourg)

Performances

- APESIN swift est un désinfectant prêt à l'emploi pour la désinfection des petites surfaces (0.5 m²).
- APESIN swift est autorisé en Belgique sous n° BE-REG-02565 ainsi qu'au Grand Duché de Luxembourg (preuve de la notification au Grand Duché de Luxembourg disponible sur demande).
- APESIN swift a une activité bactericide, levuricide, fongicide et virucide.
- En Belgique APESIN swift est un produit autorisé dans le „circuit libre“.

Domaines d'application

- PT1: Hygiène humaine: uniquement sur la peau intacte voir picto 1 & 2 (uniquement Belgique).
- PT 2: Surfaces et instruments utilisés dans le secteur de soins de santé et de soins animaliers ainsi que dans les salons de beauté, salons des ongles, manicure, pedicure et studio de tatouages. (Belgique et GD-Luxembourg).
- PT 4: Surfaces, appareils et instruments qui lors de la préparation peuvent entrer en contact direct avec les aliments / boissons ainsi que dans l'industrie alimentaire. (Belgique et GD-Luxembourg).

Mode d'emploi

- Appliquer le produit (20 – 25 ml / 0,5 m²). Respectez le temps de contact voir page 2 de la fiche technique.
- Le produit n'a pas d'activité contre les spores et mycobactéries.
- Contrôlez la compatibilité du produit avec le matériel sur une surface peu visible.

Déclaration des ingrédients:

Ingrédients pour 100 g: 76 g alcool

Sites de production et développement durable:



Précautions d'utilisation, de stockage et de conservation

Sécurité: Uniquement pour usage professionnel. Pour des informations supplémentaires consultez la fiche de sécurité du produit. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Stockage: Stockage à température ambiante dans son emballage d'origine. Gardez à l'écart de la chaleur, des surfaces chauffées, des étincelles, du feu ouvert et des sources d'ignition. Ne pas fumer.

Environnement: Déposez uniquement des emballages entièrement vide dans le container.

Utilisation et Dosage



Laver les mains ou la peau, rincer et sécher.



Appliquer le produit sur la peau intacte pendant min. 30 sec.



Soins de santé:
Appliquer le produit sur la surface.
Respecter le temps de contact. Essuyer avec du papier ou un chiffon propre.




Nettoyer et rincer les surfaces. Vaporiser le produit. Laisser agir.



Nettoyer et rincer les surfaces. Vaporiser le produit. Laisser agir.



Appliquer le produit sur la surface. Respecter le temps de contact. Essuyer avec du papier ou un chiffon propre.

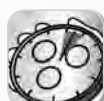

Le produit doit rester au moins 5 min. sur la surface.

Unité de vente:

Ref. d'achat.: 717230 20 x 500 ml

Le partenaire à votre service

pH



APESIN swift

Normes de désinfection de l'APESIN swift

Activité	Conditions	Temps de contact	
		30 sec.	5 min.
Bactéricide			
EN 1500	–	x	
EN 13727	Propreté		x
EN 13697	Propreté		x
Levuricide			
EN 13624	Propreté		x
EN 13697	Propreté		x
Fungizid			
EN 13624	Propreté		x
EN 13697	Propreté		x
Virucide			
EN 14476 – Poliovirus type 1	Propreté		x
EN 14476 – Adenovirus type 5	Propreté		x
EN 14476 – Norovirus	Propreté		x
EN 14476 – Rotavirus	Propreté		x